

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



GPHANTOM UGRAFT

APPRENEZ. PRATIQUEZ. PERFECTIONNEZ.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi **Gphantom**!

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement de solutions pour l'entraînement médical. Si vous souhaitez un modèle spécifique pour votre formation, veuillez nous contacter. Ici, nous vous aiderons à manier et à optimiser la durabilité de votre produit.

Votre **Gphantom Ugraft** est éligible au Programme de Fidélité Gphantom.

Consultez les conditions.



APPRENEZ. PRATIQUEZ. PERFECTIONNEZ.



À PROPOS DU PRODUIT

Gphantom UGRAFT est un modèle destiné à la formation à la technique UGRAFT (Ultrasound Guided Rectus Abdominis Fat Transfer), une procédure avancée impliquant la liposuction et la greffe de graisse dans le muscle droit de l'abdomen. Ce modèle présente une représentation didactique des muscles de l'abdomen en mode B de l'échographie, permettant une formation efficace et réaliste.

La technique UGRAFT est guidée par ultrasons, un outil crucial permettant aux chirurgiens de visualiser précisément où la graisse est injectée. Cela garantit une distribution uniforme et des résultats plus précis. Le simulateur Gphantom UGRAFT permet aux médecins de pratiquer cette technique dans un environnement sûr et contrôlé.


Notre technologie de récupération des marques d'aiguille permet à votre Gphantom de récupérer jusqu'à 99% des marques d'aiguille dans les 48 heures suivant l'entraînement, lorsque des aiguilles d'une épaisseur égale ou inférieure à 23 G sont utilisées. Pour maximiser les avantages de cette technologie de récupération des marques d'aiguille, nous vous recommandons de laisser votre produit dans un endroit frais, à l'abri du soleil, pendant 48 heures après chaque utilisation.

Si vous avez un tel besoin, veuillez nous contacter.



À PROPOS DU PRODUIT

SPECIFICATIONS

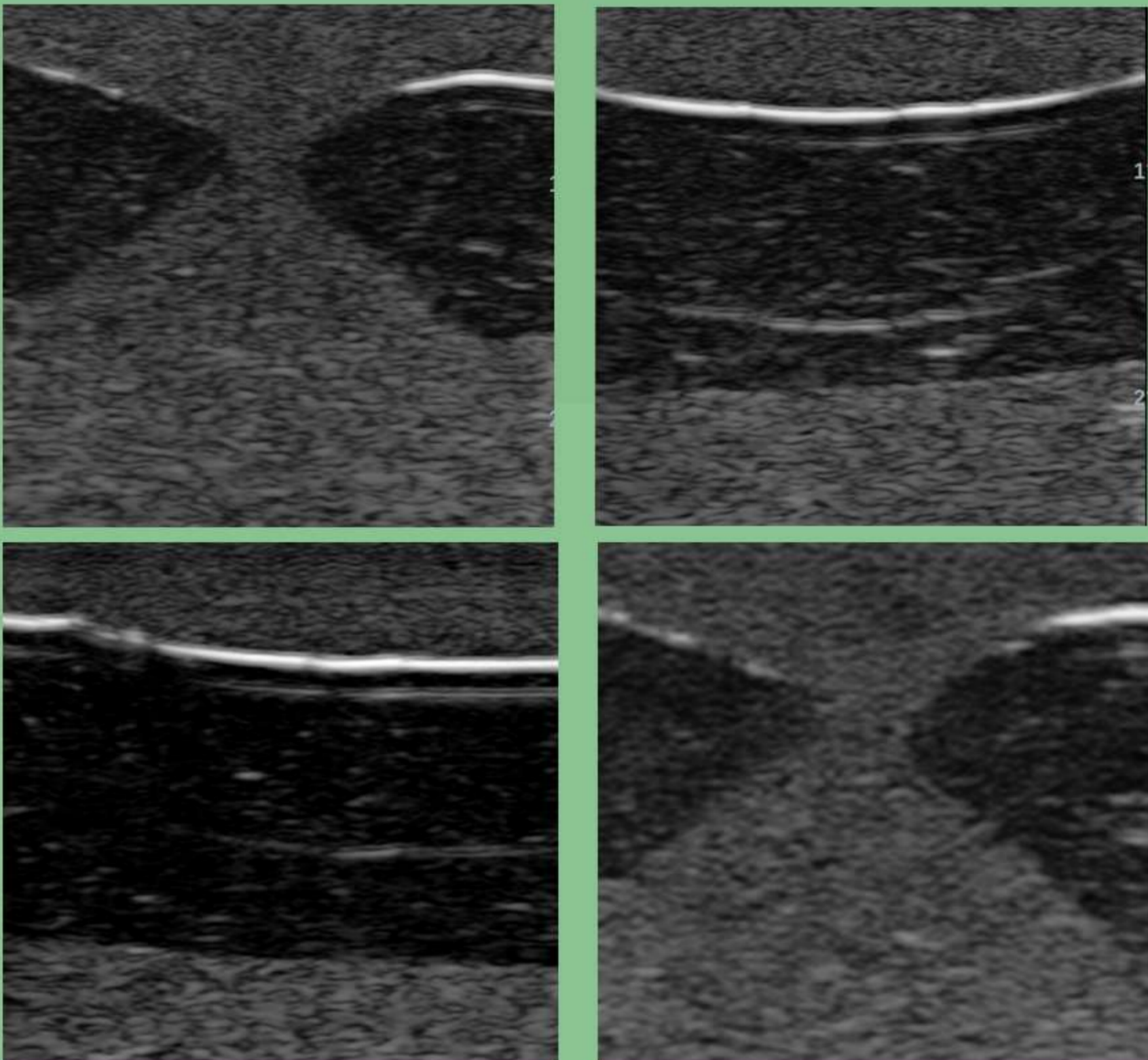

Images échographiques mode B du Gphantom Ugraft.

CODE PRODUIT	PBD0505B
POIDS APPROXIMATIF	1,200kg
LONGUEUR	22cm
HAUTEUR	14cm
LARGEUR	6,5cm



MANIPULATION ET CONSERVATION

- ① Rangez toujours votre produit dans son emballage et dans un endroit frais, à l'abri du soleil;



Remarque: Exposer votre Gphantom à des températures supérieures à 30 °C, pendant de longues périodes, peut provoquer des déformations et la perte de propriétés.

- ② Pour l'entraînement, retirez seulement le couvercle de l'emballage, en le gardant dans son socle d'origine;



- ③ Après l'entraînement, enlevant l'excès de gel à ultrason avec un papier absorbant. En cas de besoin, rincez-le sous l'eau courante, sans le retirer du socle;



Ne gardez pas le Gphantom avec un excès de gel, car cela pourrait causer une mauvaise odeur, réduisant ainsi, la durabilité du produit.

N'utilisez pas de détergents ou d'éponges, car ils endommagent le produit!



MANIPULATION ET CONSERVATION

- ④ Après le nettoyage, rangez votre Gphantom selon les instructions contenues dans l'item I;
- ⑤ Gphantom est un produit à finalité didactique, destiné, **UNIQUEMENT**, à la formation médicale. En cas de doute, veuillez nous contacter.

CONTACTO



Pour toute doute ou demande, veuillez nous contacter:



contato@gphantom.com.br



+55 1699848-2468