


# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

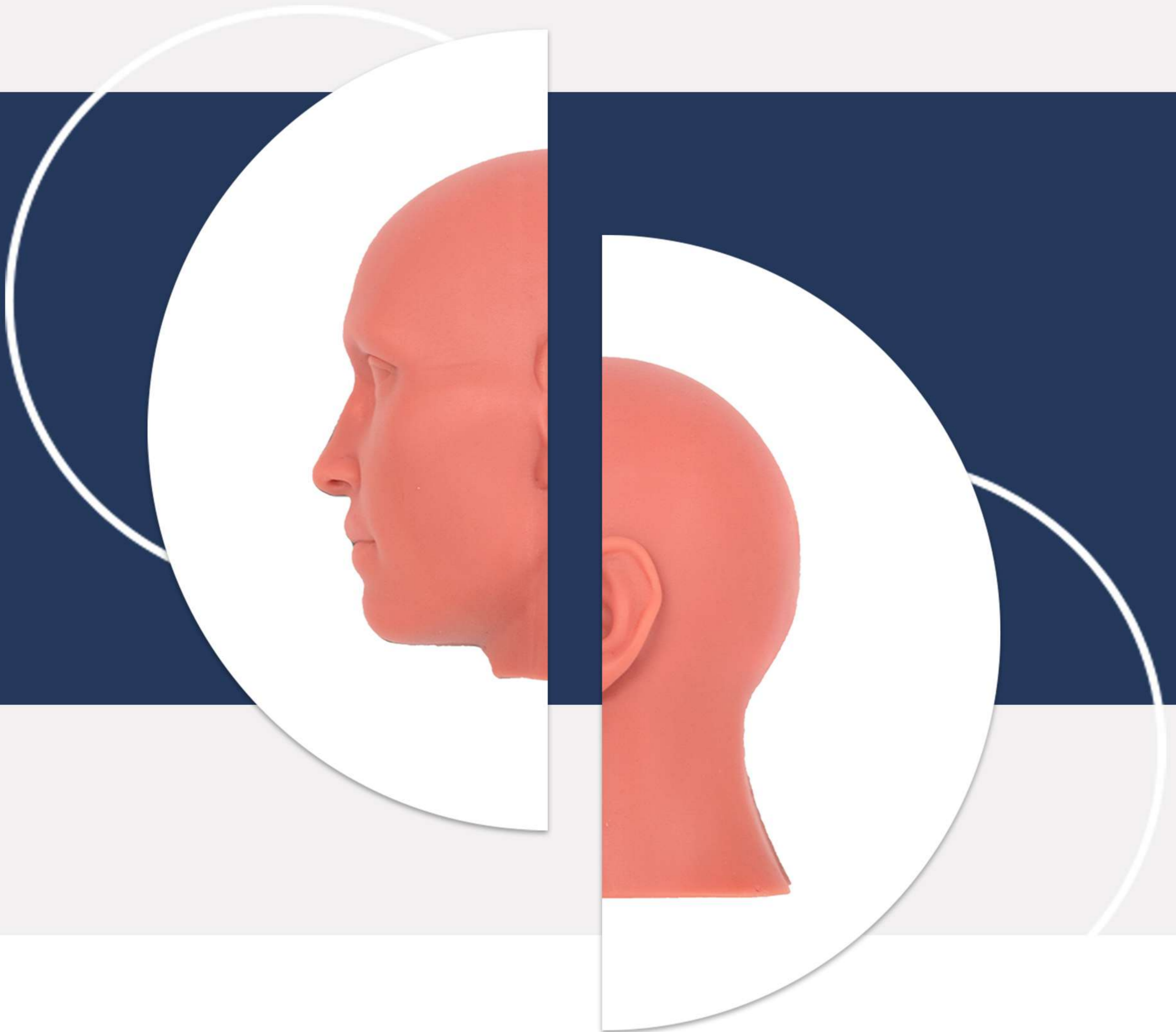

**GPHANTOM FACE ATM**

APPRENEZ. PRATIQUEZ. PERFECTIONNEZ.





# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi **Gphantom**!

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement de solutions pour l'entraînement médical. Si vous souhaitez un modèle spécifique pour votre formation, veuillez nous contacter. Ici, nous vous aiderons à manier et à optimiser la durabilité de votre produit.

Votre **Gphantom Face ATM** est éligible au Programme de Fidélité Gphantom.

Consultez les conditions.



APPRENEZ. PRATIQUEZ. PERFECTIONNEZ.





# À PROPOS DU PRODUIT

Gphantom Face ATM est un simulateur conçu pour la formation aux injections intra-articulaires, qu'elles soient aveugles ou guidées par ultrasons, ciblant les espaces articulaires supérieur et inférieur de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM), développé en collaboration avec des experts du domaine. Ce modèle reproduit l'anatomie de l'ATM, garantissant une expérience d'entraînement plus réaliste et précise. En plus de fournir une formation multimodale, avec la possibilité de simuler des injections intra-articulaires aveugles ou guidées par ultrasons, il répond à un large éventail de besoins de formation.

Il est polyvalent et adapté à différents niveaux de compétence, allant des débutants dans les techniques d'imagerie générale et de guidage des procédures d'injection intra-articulaire par ultrasons, aux praticiens plus expérimentés se concentrant sur des procédures spécifiques à l'ATM. Cela permet ainsi l'amélioration continue des compétences par une pratique répétée, assurant que les professionnels restent à la pointe de l'évolution des techniques d'injections intra-articulaires ciblées sur l'ATM.

Notre technologie de récupération des marques d'aiguille permet à votre Gphantom de récupérer jusqu'à 99% des marques d'aiguille dans les 48 heures suivant l'entraînement, lorsqu'il est utilisé avec des aiguilles d'une épaisseur de 21 G ou moins. Pour une meilleure utilisation de cette technologie de récupération des marques d'aiguille, nous vous recommandons de laisser votre produit dans un endroit frais, à l'abri de la lumière du soleil, pendant 48 heures après chaque utilisation. Nous recommandons des mouvements de 30 degrés maximum par rapport à la surface du produit, en utilisant des aiguilles comme celles mentionnées dans le point précédent. Évitez les mouvements très longs (grande angulation) après l'insertion de l'aiguille, car ils peuvent réduire la durée de vie de votre modèle. Par ailleurs, nous vous déconseillons d'injecter ou de retirer des matériaux de votre Gphantom en cours d'utilisation.


Si vous avez un tel besoin, veuillez nous contacter.





# À PROPOS DU PRODUIT

SPECIFICATIONS

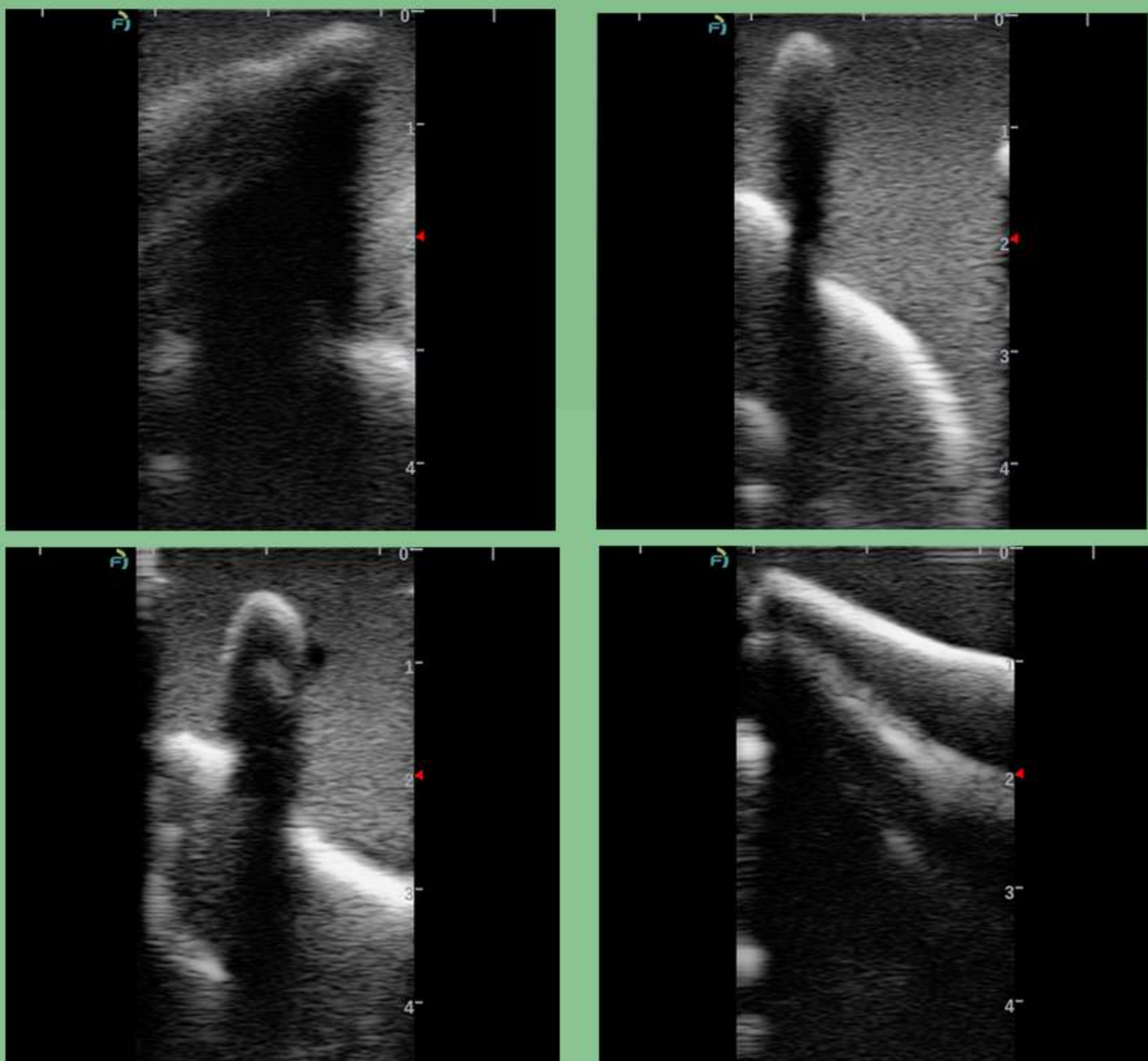

Images échographiques mode B du Gphantom Face ATM.

**CODE PRODUIT**

**PBD050518**

**POIDS APPROXIMATIF**

**1,100kg**

**LONGUEUR**

**25cm**

**HAUTEUR**

**25cm**

**LARGEUR**

**12cm**





# MANIPULATION ET CONSERVATION

- ① Rangez toujours votre produit dans son emballage et dans un endroit frais, à l'abri du soleil;



Remarque: Exposer votre Gphantom à des températures supérieures à 30 °C, pendant de longues périodes, peut provoquer des déformations et la perte de propriétés.

- ② Pour l'entraînement, retirez seulement le couvercle de l'emballage, en le gardant dans son socle d'origine;



- ③ Après l'entraînement, enlevant l'excès de gel à ultrason avec un papier absorbant. En cas de besoin, rincez-le sous l'eau courante, sans le retirer du socle;



Ne gardez pas le Gphantom avec un excès de gel, car cela pourrait causer une mauvaise odeur, réduisant ainsi, la durabilité du produit.

N'utilisez pas de détergents ou d'éponges, car ils endommagent le produit!





# MANIPULATION ET CONSERVATION

- ④ Après le nettoyage, rangez votre Gphantom selon les instructions contenues dans l'item I;
- ⑤ Gphantom est un produit à finalité didactique, destiné, **UNIQUEMENT**, à la formation médicale. En cas de doute, veuillez nous contacter.

# CONTACTO



Pour toute doute ou demande, veuillez nous contacter:



[contato@gphantom.com.br](mailto:contato@gphantom.com.br)



+55 1699848-2468